

Brugsinstruktion


Extension 5.5, 7.5, 9.5 L

Dansk version
REV 00/2019




Monteringsinstruktion

1. Læg låget på beholderen og tryk ned på lågets kant indtil du hører seks klik.

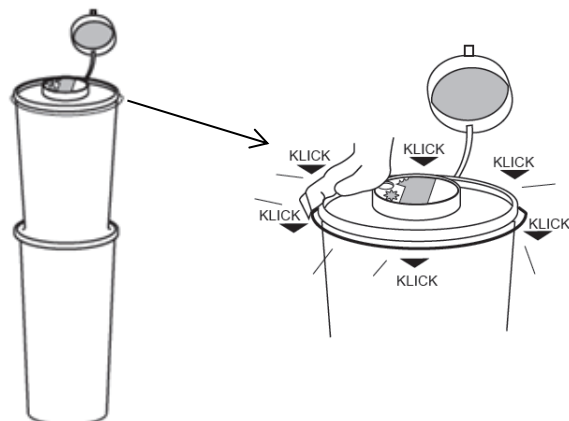


Brugsinstruktion

1. Leur Lock
2. Ekstra plads
3. Insulinpen
4. QuickFit

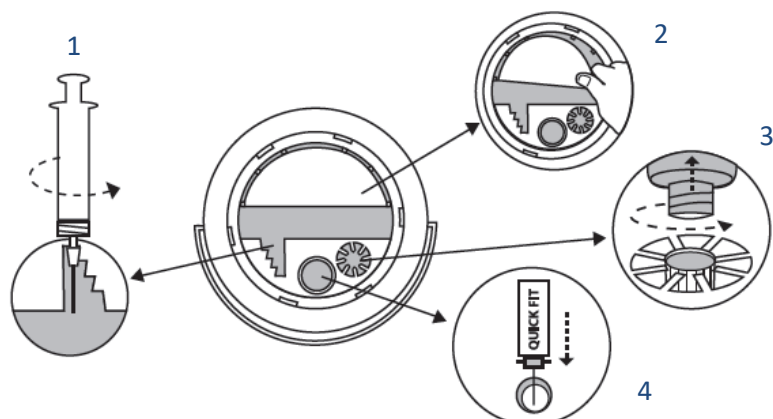


Lukningsinstruktion

- 1. Midlertidigt lukning:**
Tryk ned på det lille låg
indtil du hører et klik.

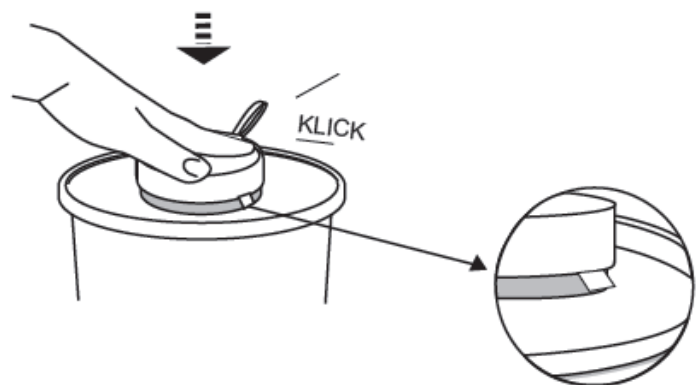

- 2. Permanenttætning:**
Tryk ned på det lille låg
indtil du hører to klik.
Indikatoren vises.

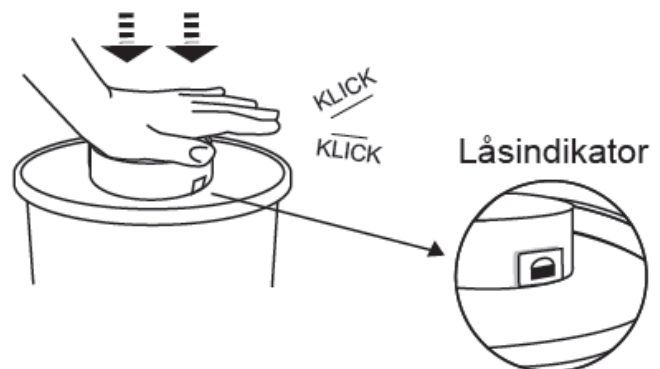

Tilbehør

			
Beskrivelse: Bordholder med fastgørelsevakuum, holder i rustfrit stål, glasfiberforstærket PVC og PC	Beskrivelse: Bordholder med fastgørelsevakuum og bajonetgreb glasfiberforstærket PVC og PC	Beskrivelse: Vægmonteret holder, rustfrit stål	Beskrivelse: Holder for at hænge, rustfrit stål
Bestilenhed: 1 st	Bestilenhed: 1 st	Bestilenhed: 1 st	Bestilenhed: 1 st (ramme og holdere)
Varenumre: 6285-00	Varenumre: 6255-6254	Varenumre: 6282-00	Varenumre: 6282-01

		
Beskrivelse: Vognholder i rustfrit stål	Beskrivelse: Bordholder med skruer, glasforstærket PC	Beskrivelse: Vægholder/Vognholder i rustfrit stål
Bestilenhed: 1 st	Bestilenhed: 1 st	Bestilenhed: 1 st
Varenumre: 6282-02	Varenumre: 6255-6272	Varenumre: 6253/6253-6260

Andet

Alle data henviser til individuelle værdier og er produkt for eventuelt ændringer.
Copyright © AB Sundplast

www.safebox.eu
www.sundplast.com

AB Sundplast
Box 15084
25015 Helsingborg
Sverige