

# Brugsinstruktion


## Mini 0,5-1,0L

Dansk version  
REV 00/2019




## Monteringsinstruktion

1. Læg låget på beholderen og tryk på låget indtil du hører seks klik.

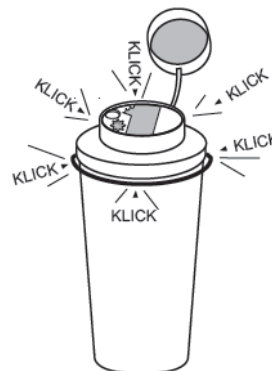

## Brugsinstruktion


1. Luer lock
2. Insulinpen

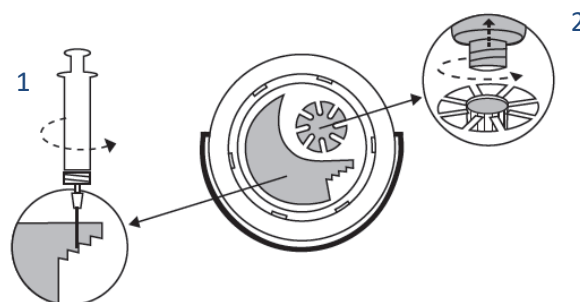

# Lukningsinstruktion


## 1. Midlertidlig lukning:

Tryk ned på lille låg indtil du hører et klik.

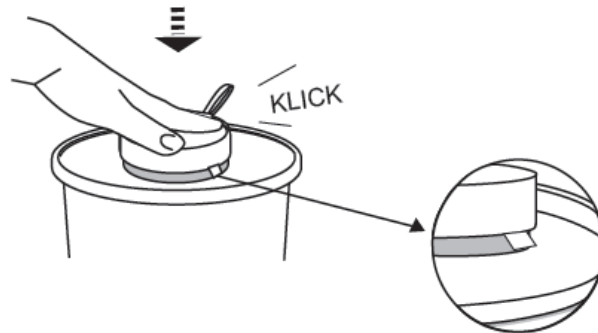

## 2. Permanent lukning:

Tryk ned på lille låget indtil du hører to klik. Indikatoren vises.

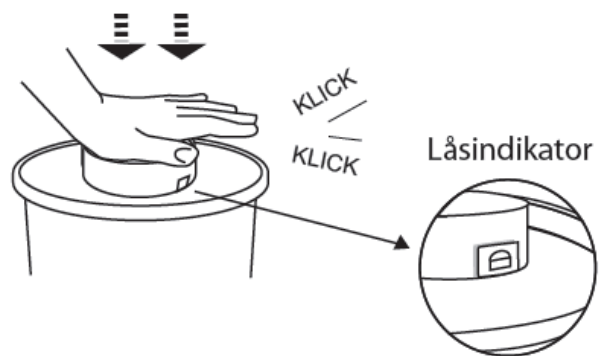

## Tilbehør

			
<b>Beskrivelse:</b> Bakke Stor, med bajonettfangst 350x250x40 mm Materiale: ABS	<b>Beskrivelse:</b> Bakke Lille, med bajonettfangst 300x150x40 mm Materiale: ABS	<b>Beskrivelse:</b> Holder for vægmontering, Rustfri stål	<b>Beskrivelse:</b> Holder for det hængende, Rustfri stål
<b>Bestilenhed:</b> 1 st	<b>Bestilenhed:</b> 1 st	<b>Bestilenhed:</b> 1 st	<b>Bestilenhed:</b> 1 st (ramme & beslag)
<b>Artikel nr:</b> 6255-6276	<b>Artikel nr:</b> 6255-6266	<b>Artikel nr:</b> 6281-00	<b>Artikel nr:</b> 6281-01

			
<b>Beskrivelse:</b> Holder for vogn, rustfri stål	<b>Beskrivelse:</b> Holder for bordmontering med skruer, glasfiberforstærket PC	<b>Beskrivelse:</b> Holder med fastgørelsevakuum, glasfiberforstærket PC og PVC	<b>Beskrivelse:</b> Holder for væg- vogn- og rørmontering, rustfri stål
<b>Bestilenhed:</b> 1 st (ramme & holdere)	<b>Bestilenhed:</b> 1 st	<b>Bestilenhed:</b> 1 st	<b>Bestilenhed:</b> 1 st
<b>Varenumre:</b> 6281-02	<b>Varenumre:</b> 6255-6272	<b>Varenumre:</b> 6255-6254	<b>Varenumre:</b> 6250/6250-6260

## Andet

Alle data henviser til individuelle værdier og er produkt for eventuelt ændringer.  
Copyright © AB Sundplast

[www.safebox.eu](http://www.safebox.eu)

[www.sundplast.com](http://www.sundplast.com)

AB Sundplast

Box 15084

25015 Helsingborg

Sverige